


# आपातकालीन पट्टी उपयोग हेतु निर्देश पाँकेट गाइड

- केवल एक बार प्रयोग हेतु, पुनःउपयोग करने पर संक्रमण का खतरा
- बायोहॉर्डस और चिकित्सा अपशिष्ट दिशानिर्देश के अनुसार के निपटान

Rev. 2013/12

MediHelp Healthcare Pvt. Ltd.

D-6, 6052/1, Vasant Kunj, New Delhi-110070, Phone- 011- 4605 2020, E-mail: medihelpindia@gmail.com

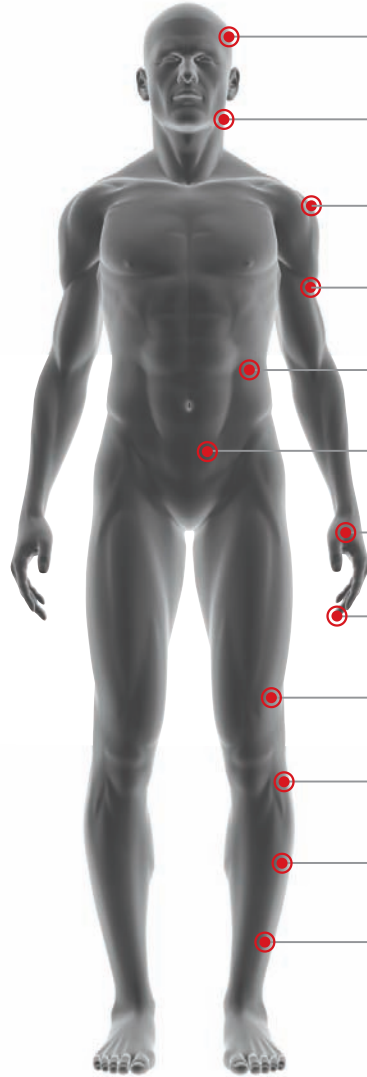

— <b>सिर</b> के घाव की ड्रेसिंग >	6-7
— <b>गर्दन</b> के घाव की ड्रेसिंग >	8-9
— <b>बाँह</b> के घाव की ड्रेसिंग एवं स्थिरिकरण >	10-11
— <b>बाँह</b> के घाव की ड्रेसिंग (डोनट/बैगल) >	12-13
— <b>कमर</b> प्रविष्टि और बाहर निकले घाव की ड्रेसिंग >	14-15
— <b>पेट</b> के घाव की ड्रेसिंग >	16-17
— <b>हाथ</b> के विच्छेदन की ड्रेसिंग >	18-19
— <b>हाथ/बाँह</b> के घाव की स्वयं अनुप्रयोग >	20-21
— <b>पैर</b> के खरोंच की ड्रेसिंग >	22-23
— <b>पैर</b> के घाव की पैकिंग और ड्रेसिंग >	24-25
— <b>पैर</b> के विच्छेदन की ड्रेसिंग >	26-27
— <b>पैर</b> के घाव की ड्रेसिंग >	28

## प्रस्तावना

## उत्पाद की विशेषताएँ

### आपातकाल में प्रथमिक चिकित्सा में नयापन (नवपरिवर्तन)

First Care ऐसे Product बनाते और बेचते हैं जिनका प्रयोग अस्पताल ले जाने से पूर्व आपातकालीन स्थिति में किया जा सके। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य ऐसे Product लाना है जिनसे उपचार में और ज्यादा सुधार हो जाए और साथ-ही-साथ समय की भी बचत हो।

Israeli Emergency Bandage - एक अनोखा जीवनरक्षक है product जो कि Israeli से आया है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल major police, दुनियाभर की Military Organisations में। US Department of Defense, US Department of Homeland Security, The Israel Defense Forces, Australian Defense Forces, Canadian Defense Forces, NATO, SWAT और EMS Worldwide और अन्य देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है।

आंकड़ों को अनुसार, आधे से ज्यादा मौतें रक्त बहने से होती हैं जिन्हें Hemorrhage Control Bandage से बचाया जा सकता है।

**Israel Bandage बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत से Trauma/Injuries में, जैसे:**

- गोली का जखम
- बालास्ट से घायल, शरीर के किसी भाग का कटना
- सडक दुर्घटना
- खून का अधिक बहना
- साप का काटना

**Hemorrhage Control के सबसे प्रभावशाली लाभ निम्नलिखित हैं:**

- खून का बहना रोकना और जिंदगी बचाना
- मेडिकल चीजों से अज्ञात व्यक्ति भी इन का उपयोग आसानी से कर सकता है।
- Trauma Bandage एवं Secondary Bandage: सभी एक ही Bandage में उपलब्ध हैं।
- इसका इस्तेमाल अपने आप किया जा सकता है, यहाँ तक की एक हाथ से भी।

**विश में एकाधिकार और अनुमोदन**

- FCP Emergency Bandages का विश में एकाधिकार है जो FDA और CE द्वारा अनुमोदित है।
- NATO संदर्भ संख्या
- अंतर्राष्ट्रीय उच्चतर स्तर के अनुसार बनाई जाती है ISO13485 के अनुसार।



### Quality & Standards




## अनुप्रयोग

## अनुप्रयोग

सिर के घाव की ड्रेसिंग



बाँह के घाव की ड्रेसिंग (डोनट/बैगल)

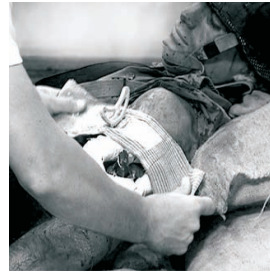

हाथ के विच्छेदन की ड्रेसिंग



पैर के घाव की पैकिंग और ड्रेसिंग



गर्दन के घाव की ड्रेसिंग



कमर के घाव की ड्रेसिंग



हाथ/बाँह के घाव की स्वयं अनुप्रयोग



पैर के विच्छेदन की ड्रेसिंग



बाँह के घाव की ड्रेसिंग एवं स्थिरकरण



पेट के घाव की ड्रेसिंग



पैर के खरोंच की ड्रेसिंग




पैर के घाव की ड्रेसिंग



## सिर के घाव की ड्रेसिंग



## सिर के घाव की ड्रेसिंग

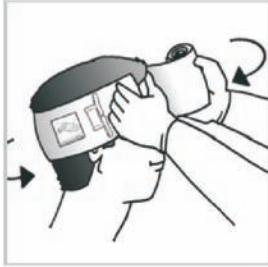

**01.**

पैड को घाव के ऊपर रखें और सिर के चारों ओर लिपटे हुए लीडर वाले प्रत्यास्थ पट्टी से लपेटें।



**04.**

आरामदायक और स्थिरता के लिए तुड़ड़ी को पकड़ते हुए प्रत्यास्थ पट्टी को लपेटना जारी रखें।



**02.**

प्रत्यास्थ पट्टी को दबाव अप्लिकेटर में डालें और सिर के चारों ओर लपेटें। दबाव अप्लिकेटर को पैड के नीचे रखते हुए बलपूर्वक पीछे की तरफ खींचें।



**05.**

बंद पट्टी के मुड़े हुए किनारे को प्रत्यास्थ पट्टी से बांधें।



**03.**

प्रत्यास्थ पट्टी को पट्टी बांधने की दिशा में घुमाते हुए अप्लिकेटर को कोने के पीछे मोड़ें।



## गर्दन के घाव की ड्रेसिंग



### 01.

रोगी के घाव के विपरित दिशा वाले बाँह को उसके सिर के ऊपर उठाएँ।



### 02.


लिपटे हुए लीडर को शरीर के चारों तरफ और घाव के विपरित दिशा वाले कांख के नीचे से लपेटें।



### 03.

प्रत्यास्थ पट्टी को दबाव अप्लिकेटर में सम्मिलित करें। प्रत्यास्थ पट्टी को मजबूती से कसें और पीछे की तरफ खींचें।

## गर्दन के घाव की ड्रेसिंग

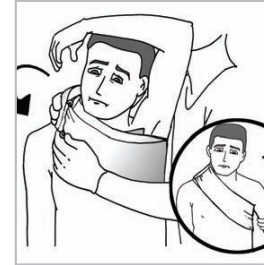

### 04.

प्रत्यास्थ पट्टी को दबाव अप्लिकेटर के ऊपर मजबूती से लपेटें। फंसे हुए किनारे को प्रत्यास्थ पट्टी से बांधें। उठे हुए बाँह को घाव के ऊपर अधिक दबाकर और श्वास नली से दूरी बनाते हुए झुकाएँ।

## बाँह के घाव की ड्रेसिंग एवं स्थिरिकरण




## बाँह के घाव की ड्रेसिंग एवं स्थिरिकरण




# 01.

पैड को घाव के ऊपर रखें।

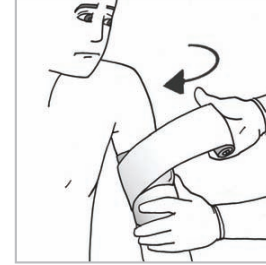


# 04.

प्रत्यास्थ पट्टी को दबाव अप्लिकेटर के ऊपर मजबूती से लपेटें। पैड के सभी किनारों को लपेटें।

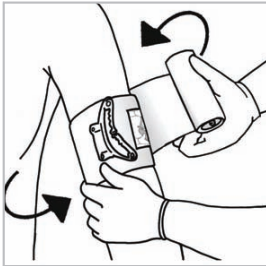

# 02.

प्रत्यास्थ पट्टी को जोड़ के चारों ओर लपेटें।

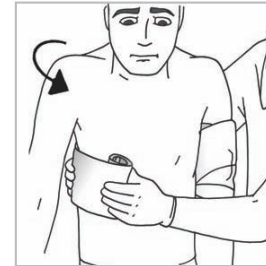


# 05.

बचे हुए लिफटे लीडर का प्रयोग शरीर के बाँह वाले हिस्से को आगे या शरीर के पीछे से होते हुए काँख के नीचले भाग से होते हुए घायल बाँह के चारों ओर खप्पची बांधने में करें।



# 03.

प्रत्यास्थ पट्टी को दबाव अप्लिकेटर के भीतर डालें। प्रत्यास्थ पट्टी को कसैं और प्रेशर बार को पैड पर नीचे की ओर बल देते हुए पीछे की तरफ खींचें।

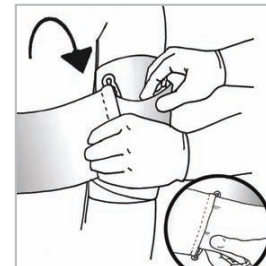

# 06.

बंद पट्टी के मुड़े हुए किनारे को प्रत्यास्थ पट्टी से बांधें।

## बाँह के घाव की ड्रेसिंग (डोनट/बैगल)



## बाँह के घाव की ड्रेसिंग (डोनट/बैगल)



# 01.

बैगल या डोनट को उभरे हुए श्रैणल के चारो ओर ठीक जगह पर रखें।



# 04.

1. बैगल के बाहरी घेरे ऊपर पट्टी को लपेटना जारी रखें।
2. बंद पट्टी को मोड़ते हुए लीडर को लिपटे लीडर के पहले वाले सतहों के अंदर मोड़ें।



# 02.

प्रत्यास्थ पट्टी को घाव के चारो ओर मजबूती से लगाने के लिए बैगल के बाहरी घेरे के ऊपर लपेटें।




# 03.

लिपटे हुए लीडर को दबाव अप्लिकेटर के अंदर डालें और लपेटने की दिशा बदलें।




## कमर प्रविष्टि और बाहर निकले घाव की ड्रेसिंग कमर के घाव की ड्रेसिंग

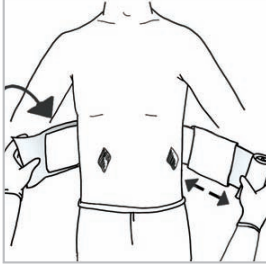


# 01.

प्रत्यास्थ पट्टी को अंग या शरीर के भाग पर दबाव अप्लिकेटर द्वारा तेजी से बह रहे खून वाले घाव के ऊपर पैड को घाव पर लगाते हुए लपेटें।

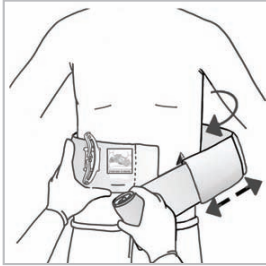

# 02.


प्रत्यास्थ पट्टी को दबाव अप्लिकेटर में डालें।

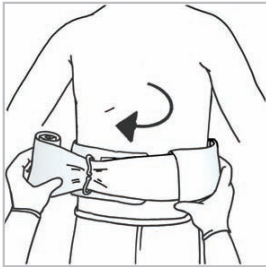

# 03.


प्रत्यास्थ पट्टी को मजबूती से लपेटे तथा...

## कमर प्रविष्टि और बाहर निकले घाव की ड्रेसिंग कमर के घाव की ड्रेसिंग

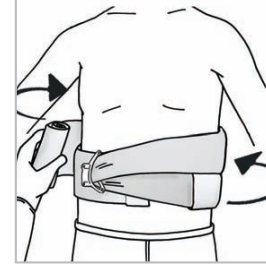


# 04.

...दबाव अप्लिकेटर को पैड पर नीचे की ओर बल देते हुए पीछे की तरफ खींचें,

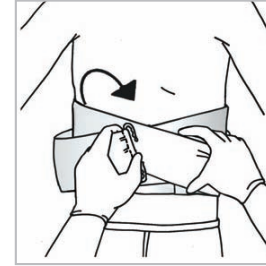

# 05.

प्रत्यास्थ पट्टी को दबाव अप्लिकेटर के ऊपर मजबूती से लपेटें। पैड के सभी किनारों को लपेट दें।

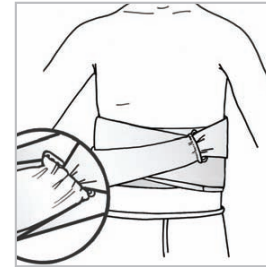


# 06.

बंद पट्टी के मुड़े हुए किनारों को प्रत्यास्थ पट्टी से बांधें।

## पेट के घाव की ड्रेसिंग




## पेट के घाव की ड्रेसिंग

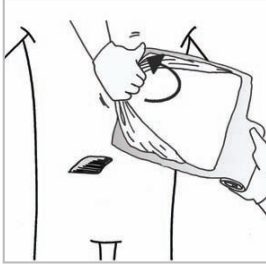


# 01.

यदि आवश्यक न हो तो प्लास्टिक अवरोध को हटायें।

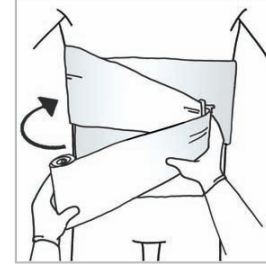


# 04.

पट्टी की दिशा को बदलें और प्रत्यास्थ पट्टी को पैड के निचले आधे हिस्से को ढंकने के लिए लपेटें।

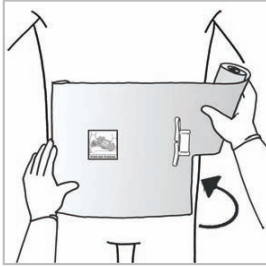


# 02.

पैड को घाव के आसपास रखें।  
(नीचे की तरफ न दबायें।)

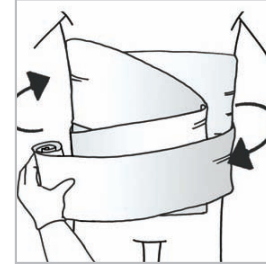


# 05.

1. धड़ के चारों ओर लपेटते हुए आगे बढ़ें।
2. यह सुनिश्चित करें कि पैड के सभी किनारे ढंके हैं या नहीं।

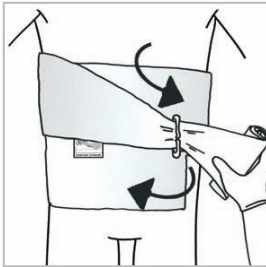

# 03.


1. प्रत्यास्थ पट्टी को धड़ के चारों ओर लपेटें और शरीर के आगे की ओर लायें (मजबूती से नहीं)।
2. प्रत्यास्थ पट्टी को पैड के ऊपर वाले आधे हिस्से में लपेटें, दबाव अप्लिकेटर को अंदर डालें।

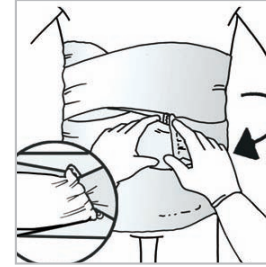

# 06.


1. बंद पट्टी को मोड़ते हुए लीडर को लिपटे लीडर के पहले वाले सतहों के अंदर मोड़ें।
2. घाव के आसपास वाले हिस्से में नमी रखने के लिए बैंडेज पैड को पूर्ण रूप से गीला करें।

## हाथ के विच्छेदन की ड्रेसिंग

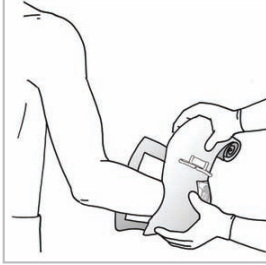


**01.**

स्टंप को पैड के बीच में रखें।

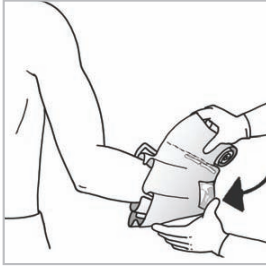

**02.**


स्टंप को पट्टी वाले पैड में लपेटें।

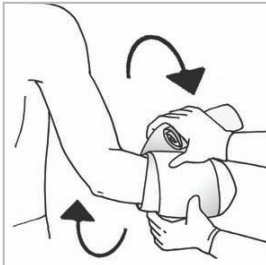

**03.**


प्रत्यास्थ पट्टी से ढके पैड के सभी किनारों को कसकर लपेटें।

## हाथ के विच्छेदन की ड्रेसिंग

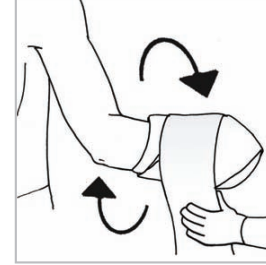


**04.**

लिपटे लीडर में से 2-3 बिना लिपटें चक्करों को छोड़ दें।

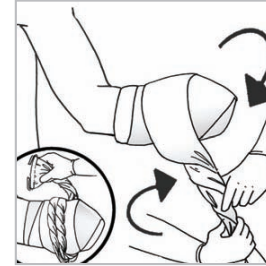

**05.**

रस्सी से बिना लिपटे प्रत्यास्थ पट्टी को मोड़ें और पैड के किनारों के ऊपर पहले से लिपटे प्रत्यास्थ पट्टी को लपेटें।

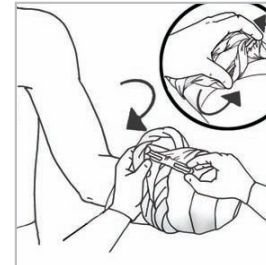


**06.**

लिपटी डोरी के बीच बंद पट्टी को डाले तथा प्रभावित टर्निकेट पर घुमायें।

## हाथ/बांह के घाव की स्वयं अनुप्रयोग




## हाथ/बांह के घाव की स्वयं अनुप्रयोग

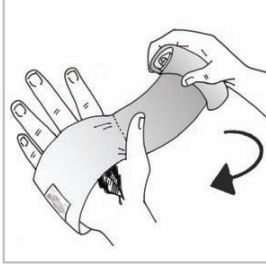


**01.**

पट्टी को स्थिरता के लिए घायल हहाथ को घुमावदार वक्र के अंदर खिसकाएं।

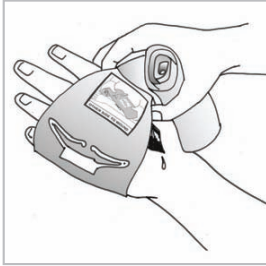


**02.**

पट्टी तथा दाब अप्लीकेटर की इस स्थिति से घाव के आस-पास के क्षेत्र पर आराम रहेगा।

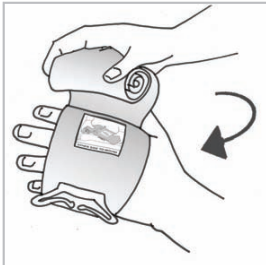


**03.**

प्रत्यास्थ पट्टी को लपेटने के लिए अपने दूसरे हाथ का प्रयोग करें।

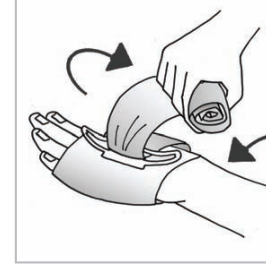


**04.**

प्रत्यास्थ पट्टी को प्रेशर अप्लिकेटर में सम्मिलित करें। प्रत्यास्थ पट्टी को कसों और प्रेशर अप्लिकेटर को पैड के नीचे लाने हेतु बलपूर्वक पीछे की ओर खींचें।

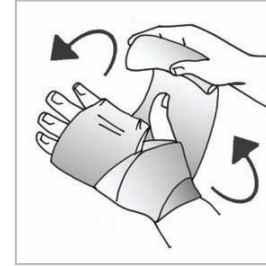

**05.**


प्रत्यास्थ पट्टी को प्रेशर अप्लिकेटर के ऊपर मजबूती से लपेटें।

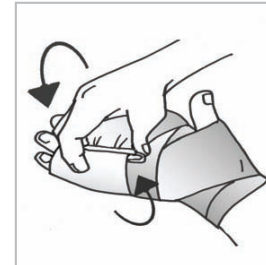

**06.**

बंद पट्टी के मुड़े किनारों को प्रत्यास्थ पट्टी से कसकर बांधें।

## पैर के खरोंच की ड्रेसिंग

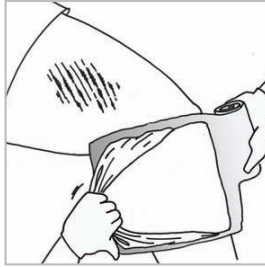


### 01.

यदि आवश्यक न हो तो प्लास्टिक अवरोध को हटायें।



### 02.


पैड को घाव के आसपास रखें।

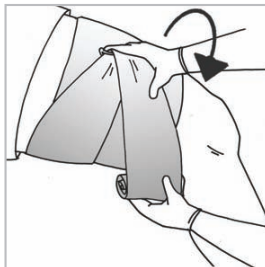

### 03.


1. प्रत्यास्थ पट्टी को अंग के चारों ओर लपेटें।  
2. प्रत्यास्थ पट्टी को पैड के ऊपर वाले आधे हिस्से में लपेटें और इसे पट्टी की दिशा को बदलने के लिए दबाव अप्लिकेटर के अंदर डालें।

## पैर के खरोंच की ड्रेसिंग

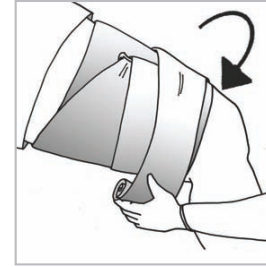

### 04.

प्रत्यास्थ पट्टी को पैड के निचले आधे हिस्से को ढंकने के लिए लपेटें।

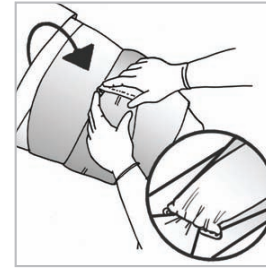


### 05.


1. अंग के चारों ओर लपेटते हुए आगे बढ़ें।  
2. यह सुनिश्चित करें कि पैड के सभी किनारे ढंके हैं या नहीं।



## पैर के घाव की पैकिंग और ड्रेसिंग

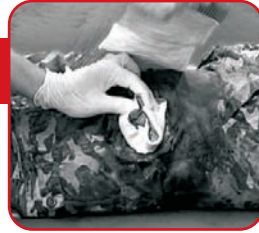


## पैर के घाव की पैकिंग और ड्रेसिंग

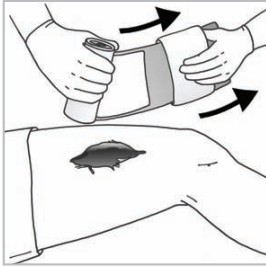


# 01.

पट्टी से दूसरी चल पट्टी हटाएं।

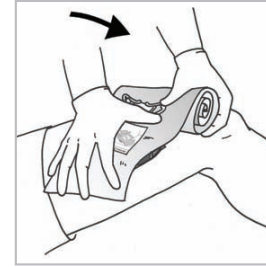


# 04.

दाब अप्लिकेटर के साथ स्थिर पट्टी की स्थिति पैक घाव के ऊपर हो।

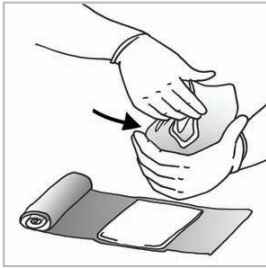

# 02.

पट्टी से एक गेंद का आकार बनाएं तथा ...

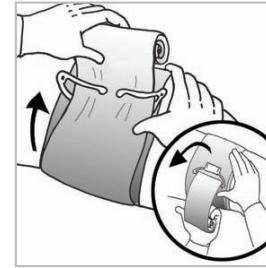


# 05.

प्रत्यास्थ पट्टी को दबाव अप्लिकेटर में सम्मिलित करें। प्रत्यास्थ पट्टी को कसें और वापस खींचें।



# 03.

... इसे घाव पर रख दें।

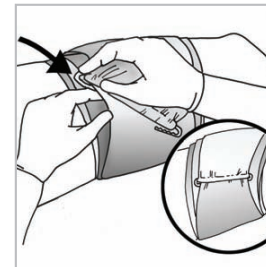


# 06.

प्रत्यास्थ पट्टी को दबाव अप्लिकेटर के ऊपर कसकर लपेटें। क्लोजर बार के हुकिंग इंड को प्रत्यास्थ पट्टी में सुरक्षित करें।

## पैर के विच्छेदन की ड्रेसिंग




## पैर के विच्छेदन की ड्रेसिंग

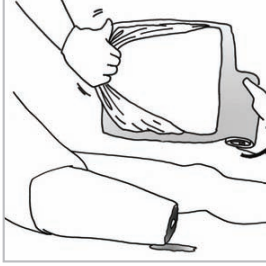


### 01.

अगर आवश्यकता न हो तो प्लास्टिक कवर हटायें।

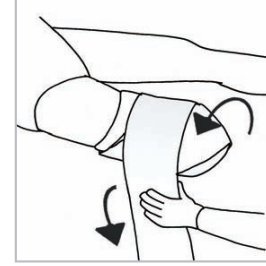


### 04.

पट्टी के 2-3 चक्कर बिना लपेटे छोड़ दें।

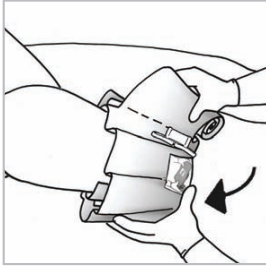


### 02.

1. पैड के केंद्र में स्टंप रखें.  
2. स्टंप को पट्टी में रखें।

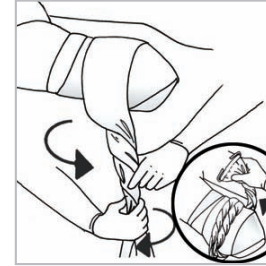


### 05.

बिना लिपटे एलास्टिक बैंडेज को कोर्ड में मोड़ें और अंग पर पूर्व से लिपटे पैड के चारो ओर लपेटें।

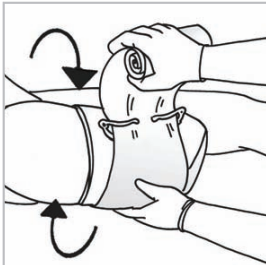

### 03.

पैड के सभी किनारों को मजबूती से लपेटने के लिए बकसुए को प्रेशर अप्लिकेटर के रूप में प्रयोग करें।

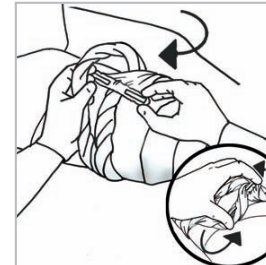

### 06.

लिपटे डोरियों के बीच बंद पट्टी सम्मिलित करें और रक्तबंद प्रभाव को बदलें। लपेटन लीडर की बंद पट्टी को हुक के साथ सुरक्षित करें।

## पैर के घाव की ड्रेसिंग



## उत्पाद के विवरण




# 01.

घाव पर पैड को रखें।



Type. FCP-01  
Description. Military personal field dressing  
Pad size. 4 inch / 10 cm  
Color. Green  
Units per box. 100  
Part no. 100121000

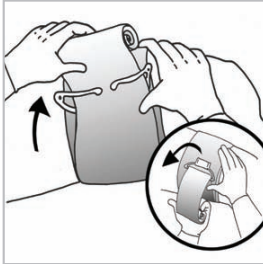


# 02.

ऐलास्टिक पट्टी को दाब अप्लीकेटर डालें।



Type. FCP-02  
Description. Military personal field dressing  
Pad size. 6 inch / 15 cm  
Color. Green  
Units per box. 120  
Part no. 100221000

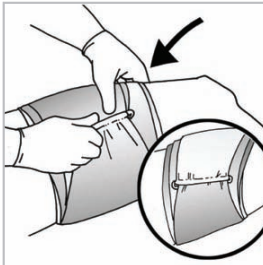

# 03.

ऐलास्टिक पट्टी को दाब अप्लीकेटर के ऊपर मजबूती से लपेटें। पैड के सभी किनारों को ढकें। ऐलास्टिक पट्टी में बंद सिरों को सुरक्षित रखें। लोचदार में बंद पट्टी के सिरों के ऊपर सुरक्षित करें।



Type. FCP-05  
Description. Military entry/exit wound dressing (2nd mobile pad)  
Pad size. 6 inch / 15 cm  
Color. Green  
Units per box. 100  
Part no. 100521000



Type. FCP-09 +  
Description. Military Multi-Bandage  
Pad size. 12 inch / 30 cm  
Color. Green  
Units per box. 60  
Part no. 100929000